

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

DIRECTIVES CHUV 100 GENERALITES

102 EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

SOMMAIRE

Chapitres	Pages
Répertoire directives	
0. INTRODUCTION	
0.1. Généralités	
0.1.1. Références	4
0.1.2. Liste des fournisseurs	5
1. ACCESSOIRES MURAUX	
1.1. Chambre d'hospitalisation et salle d'examen	
1.1.1. Coupe dès septembre 2009.....	7
1.1.2. Coupe dès novembre 2001.....	8
1.1.3. Coupe jusqu'à octobre 2001	9
1.2. Soins continus et Soins intensifs	
1.2.1. Coupe dès novembre 2001.....	10
1.2.2. Coupe jusqu'à octobre 2001	11
1.3. Salle de soins continus de pédiatrie	
1.3.1. Coupe	12

Chapitres	Pages
Répertoire directives	
1.4 Détails	
1.4.1.1. Rail de support plateau	13,14
1.4.1.2. Rail porte-monitoring lourd	15,16
1.4.2.1. Plateau porte-monitoring	17
1.4.2.2. Support monitoring orientable CHUV ..	18,19,20, 21,22
1.4.3. Rail de support accessoires.....	23
1.4.4.1. Butoir de lit dès novembre 2001	24
1.4.4.2. Butoir de lit jusqu'à octobre 2001.....	25
2. EQUIPEMENT DES GAINES TECHNIQUES A USAGE MEDICAL	
2.1 Nombre standard d'élément par lit dans les divers locaux	26

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS**REPERTOIRE DES DIRECTIVES CIT-S**

N°	Titres
100	GENERALITES
101	<u>IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES</u>
102	<u>EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS</u>
103	DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR (DAO)
200	ELECTRICITE
201	<u>INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES</u>
300	SANITAIRE
301	<u>GAZ</u>
302	<u>INSTALLATIONS SANITAIRES</u>
303	<u>TRAITEMENT D'EAU</u>
400	CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / REFRIGERATION
401	<u>INSTALLATIONS VENTILATION ET CLIMATISATION</u>
402	<u>INSTALLATION DE CHAUFFAGE</u>
403	<u>INSTALLATION FRIGORIFIQUE, REFROIDISSEMENT, PRODUCTION DE FROID</u>
500	BATIMENT
502	<u>SIGNALISATIONS INTÉRIEURES</u>
600	GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
601	<u>GTB SUPERVISION</u>
602	<u>MCR MESURES CONTRÔLES ET RÉGULATION</u>

0. INTRODUCTION

0.1. GÉNÉRALITÉS

0.1.1.	Références.....	4
0.1.2.	Liste des fournisseurs principaux	5

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS**0. INTRODUCTION****0.1. GÉNÉRALITÉS****0.1.1. RÉFÉRENCES****A. RÉFÉRENCE POUR TECHNIQUES DE MONTAGE DES GAZ MEDICAUX DANS LES CANAUX D'ALLEGES**

Norme EN 737-3 à commander à :

Association suisse de la normalisation, Muhlebachstrasse 54, 8008 Zurich

B. IDENTIFICATION DES PRISES

L'identification des prises électriques s'effectue selon le cahier des **DIRECTIVES CHUV N° 101 IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES**

C. CONCEPT D'INSTALLATION ET CONTROLE DES PRISES DE GAZ MEDICAUX

Le montage des prises de gaz médicaux, le contrôle, l'identification, les techniques de soudage, etc. sont à voir dans le cahier des **DIRECTIVES CHUV N° 301 GAZ**

D. APPAREILLAGE ET MATERIEL DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Pour l'appareillage et le matériel standardisé dans les installations électriques, voir le cahier des **DIRECTIVES CHUV N° 201 INSTALLATIONS ELECTRIQUES**

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

0. INTRODUCTION

0.1. GÉNÉRALITÉS

0.1.2. LISTE DES FOURNISSEURS PRINCIPAUX*Index des entreprises citées dans ce cahier de DIRECTIVES-CHUV***DRÄGER MEDICAL SUISSE SA**

Plateau porte monitoring, supports et attaches pour rails
Rte du Grand-Pré 4
1000 **Lausanne 6**

021/621.12.12

CHUV

Support monitoring orientable selon dessin 1.3.2.2
Atelier des mécaniciens

021/314.62.84

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.1. Chambre d'hospitalisation et salle d'examen

1.1.1.	Coupe dès septembre 2009	7
1.1.2.	Coupe dès novembre 2001	8
1.1.3.	Coupe jusqu'à octobre 2001	9

1.2. Soins continus et intensifs

1.2.1.	Coupe dès novembre 2001	10
1.2.2.	Coupe jusqu'à octobre 2001	11

1.3. Salle de soins continus de pédiatrie

1.3.1.	Coupe	12
--------	-------------	----


1.4. Détails

1.4.1.1.	Rail de support plateau	13,14
1.4.1.2.	Rail porte monitoring lourd	15,16
1.4.2.1.	Plateau porte-monitoring	17
1.4.2.2.	Support monitoring orientable CHUV	18,19,20,21,22
1.4.3.	Rail de support accessoires	23
1.4.4.1.	Butoir de lit dès novembre 2001	24
1.4.4.2.	Butoir de lit jusqu'à octobre 2001	25

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

- 1. ACCESSOIRES MURAUX
- 1.1. CHAMBRE D'HOSPITALISATION ET SALLE D'EXAMEN
- 1.1.1. COUPE

VALABLE DES SEPTEMBRE 2009

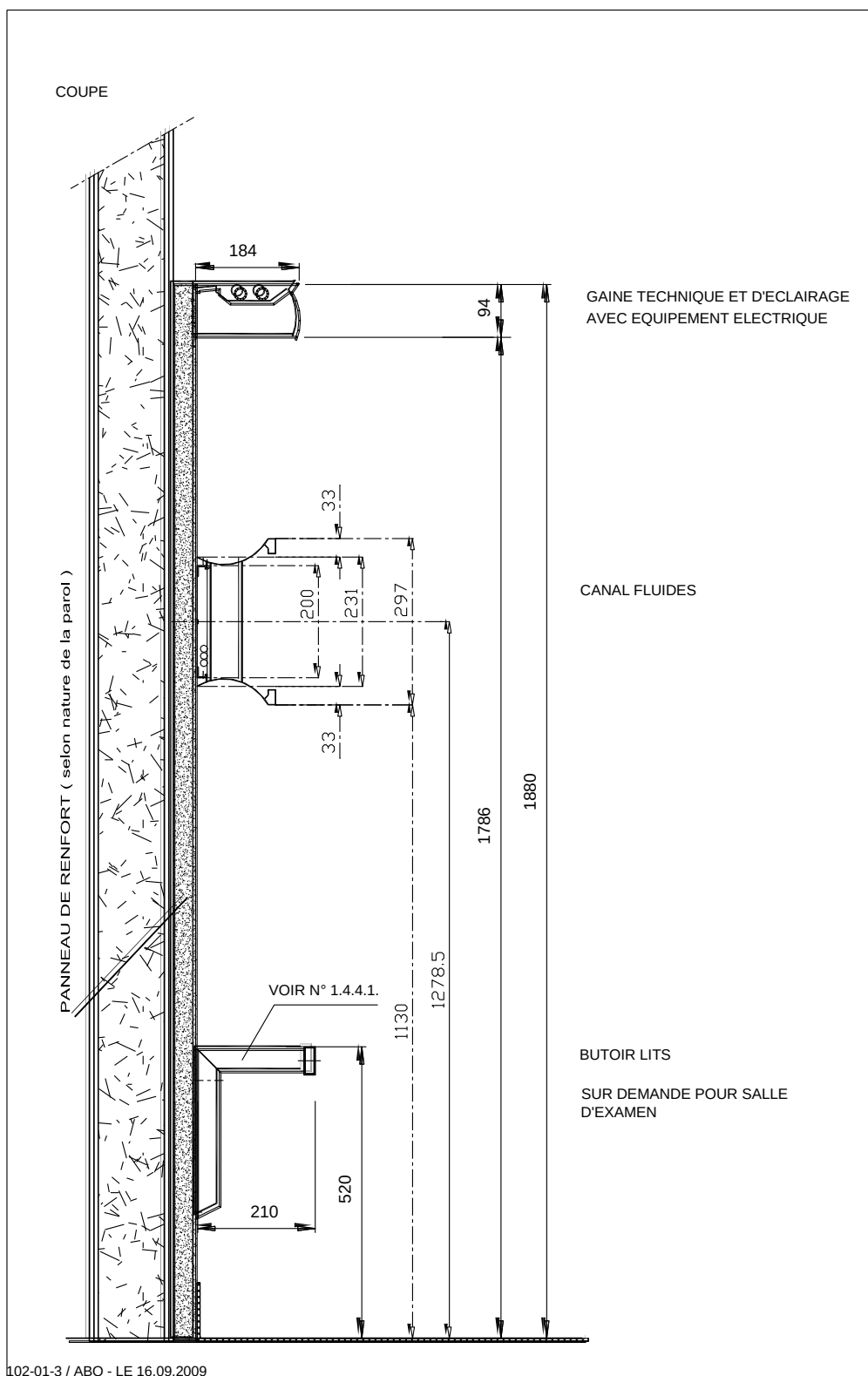


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX
- 1.1. CHAMBRE D'HOSPITALISATION ET SALLE D'EXAMEN

VALABLE DES NOVEMBRE 2001

1.1.2. COUPE

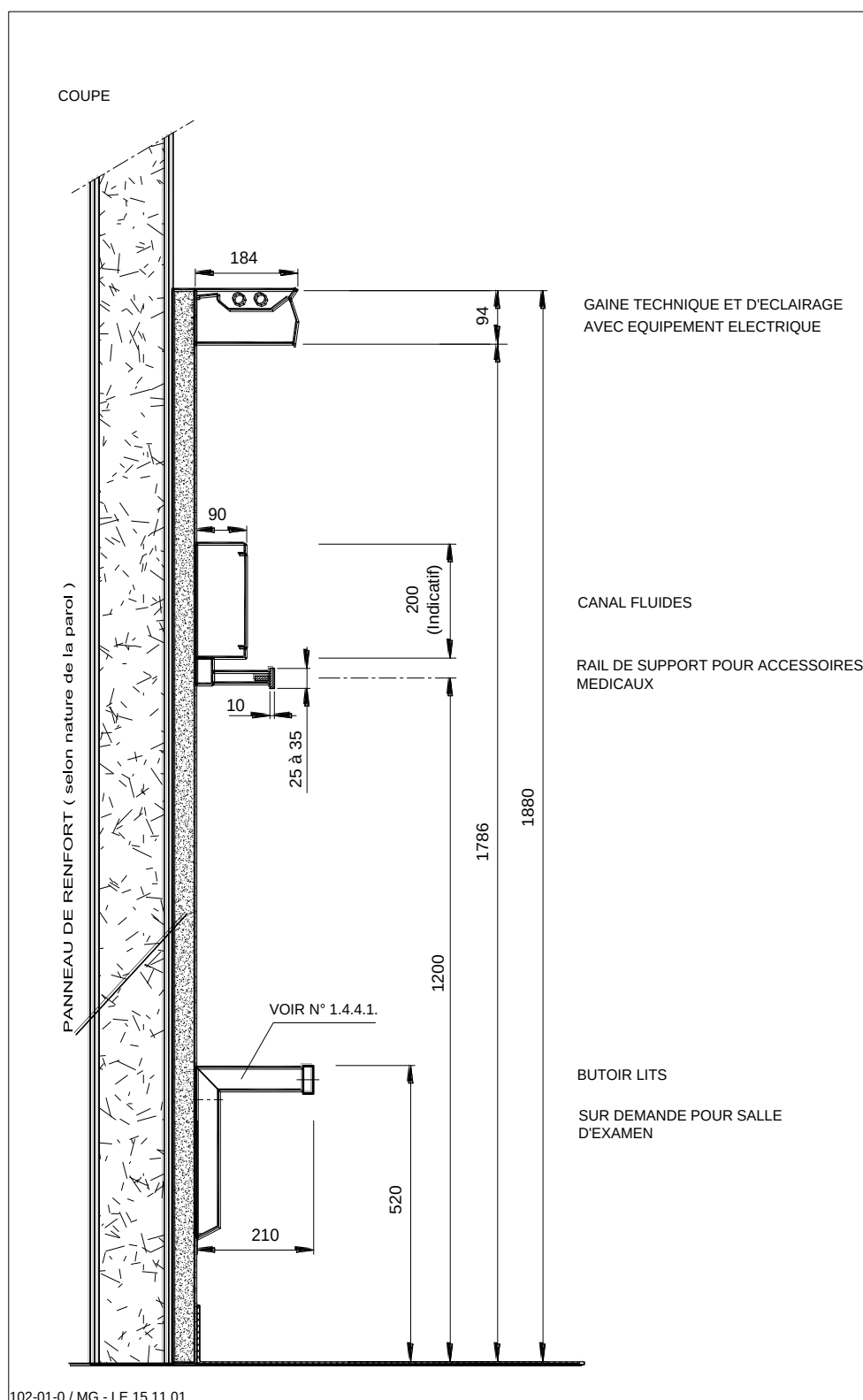


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX
- 1.2. SOINS CONTINUS ET SOINS INTENSIFS

VALABLE DES NOVEMBRE 2001

1.2.1. COUPE

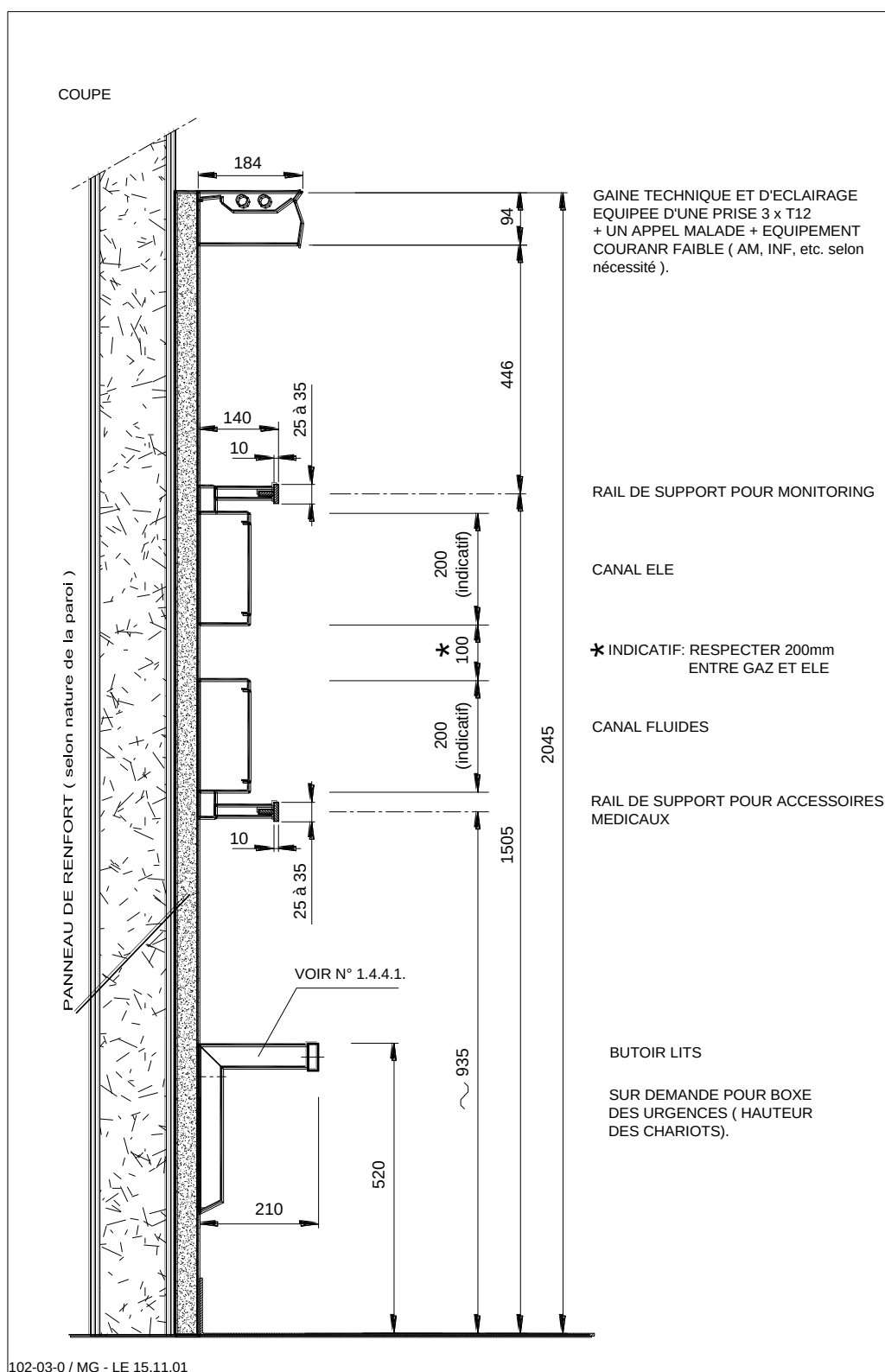


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX
- 1.3. SALLE DE SOINS CONTINUS DE PEDIATRIE

VALABLE JUSQU'À OCTOBRE 2001

1.3.1. COUPE

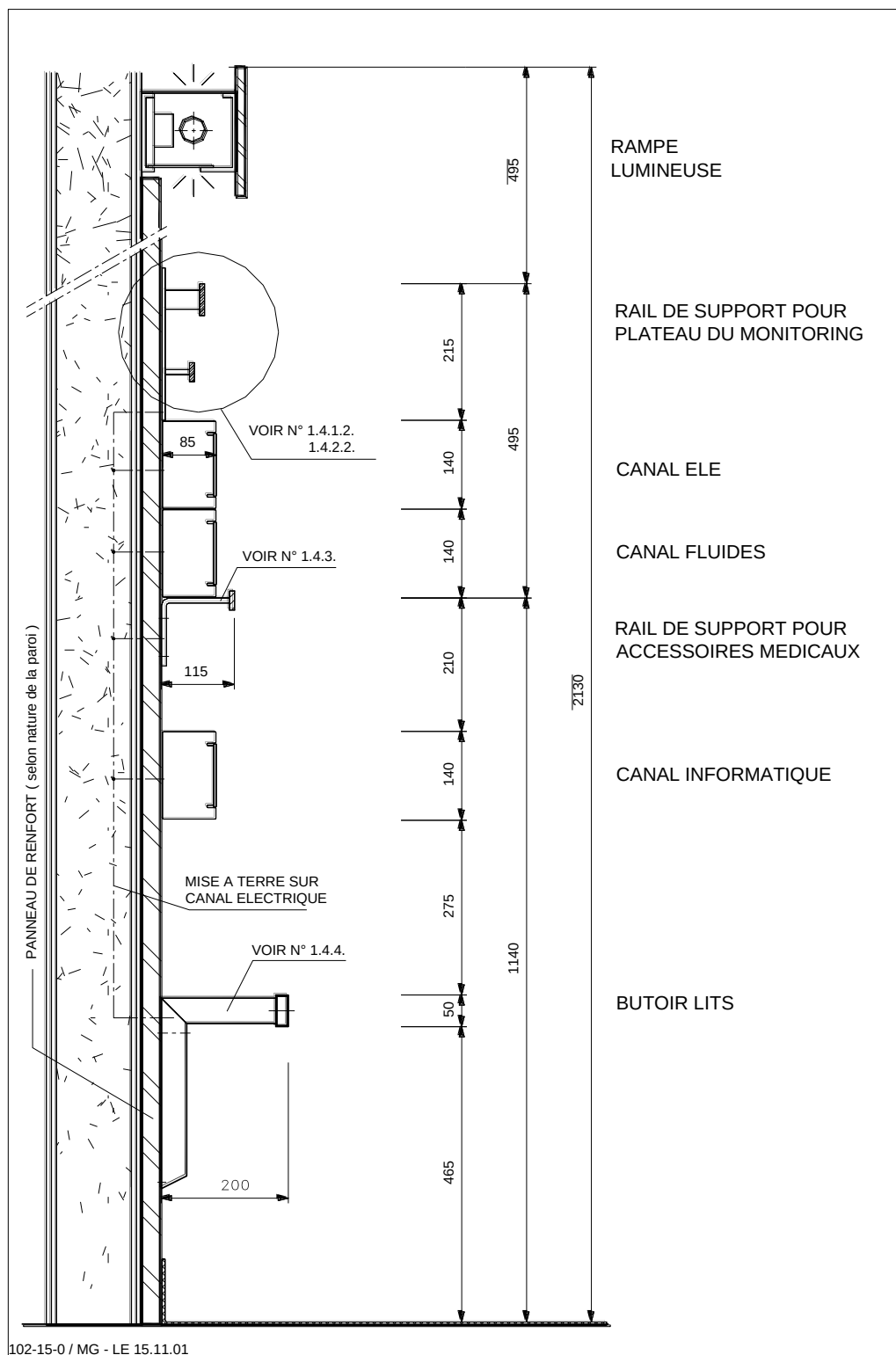


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS

1.4.1.1. RAILS DE SUPPORT PLATEAU

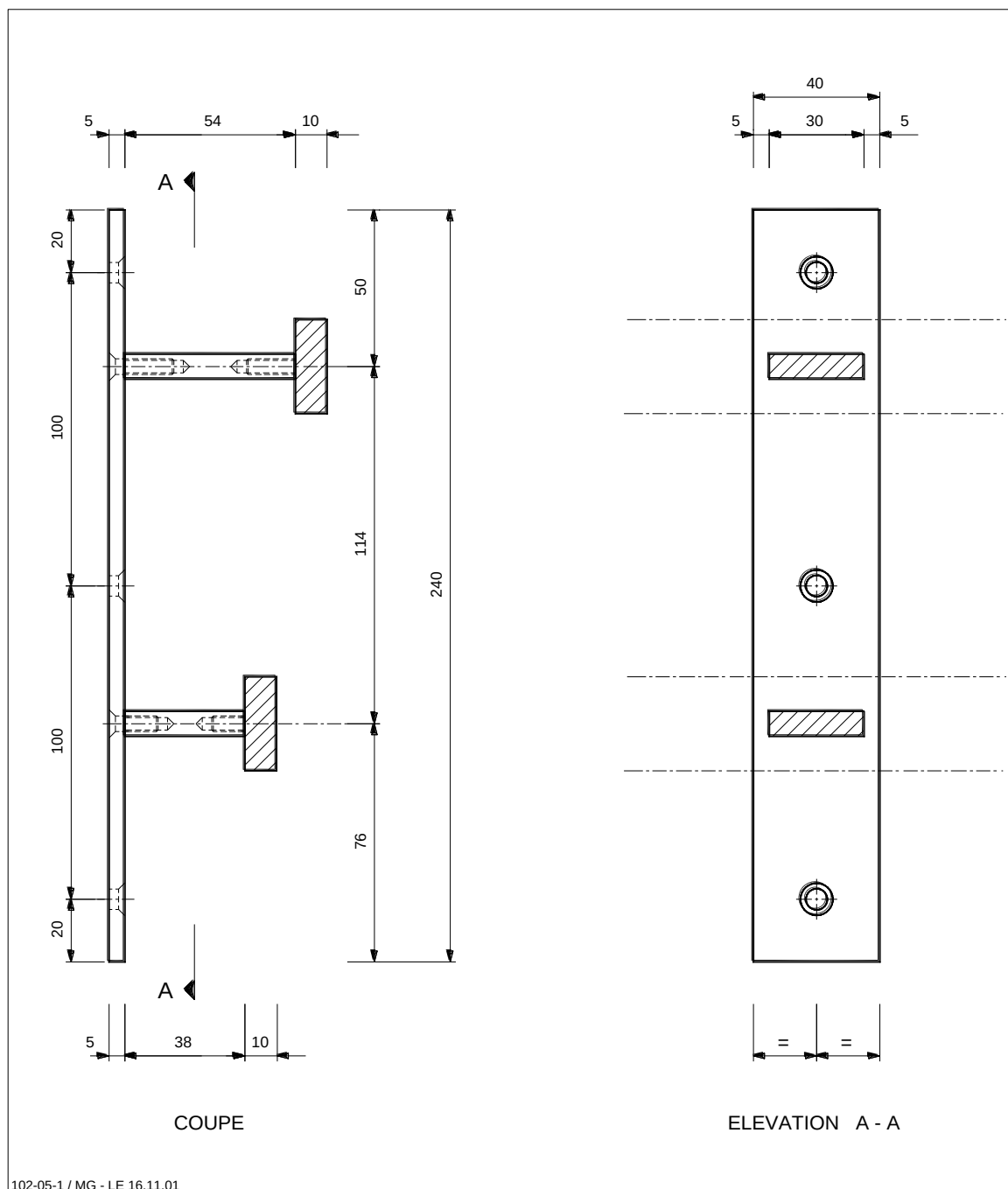


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS

1.4.1.1. RAIL DE SUPPORT PLATEAU (ISOMÉTRIE)

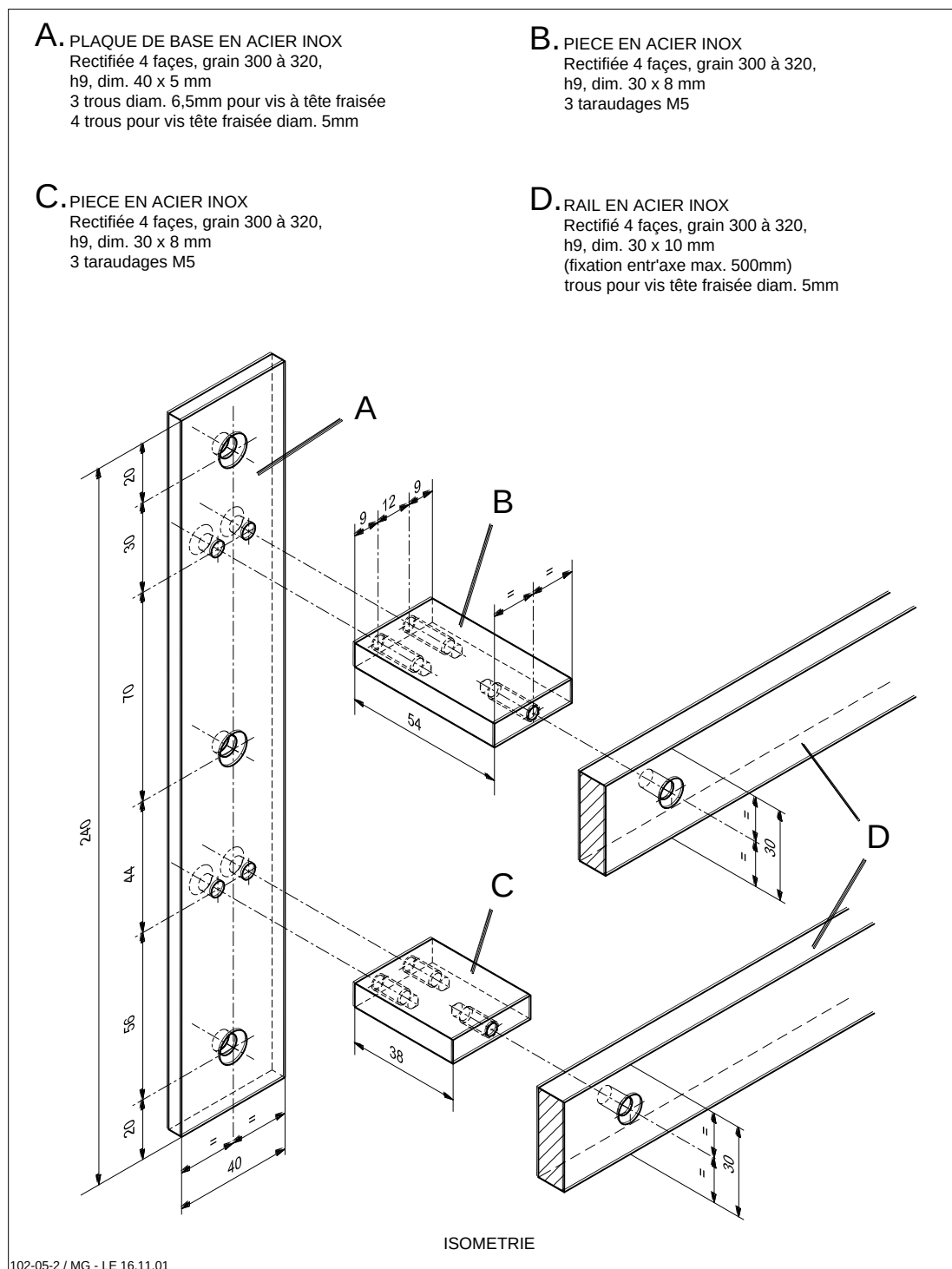


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS

1.4.1.2. RAIL PORTE-MONITORING LOURD

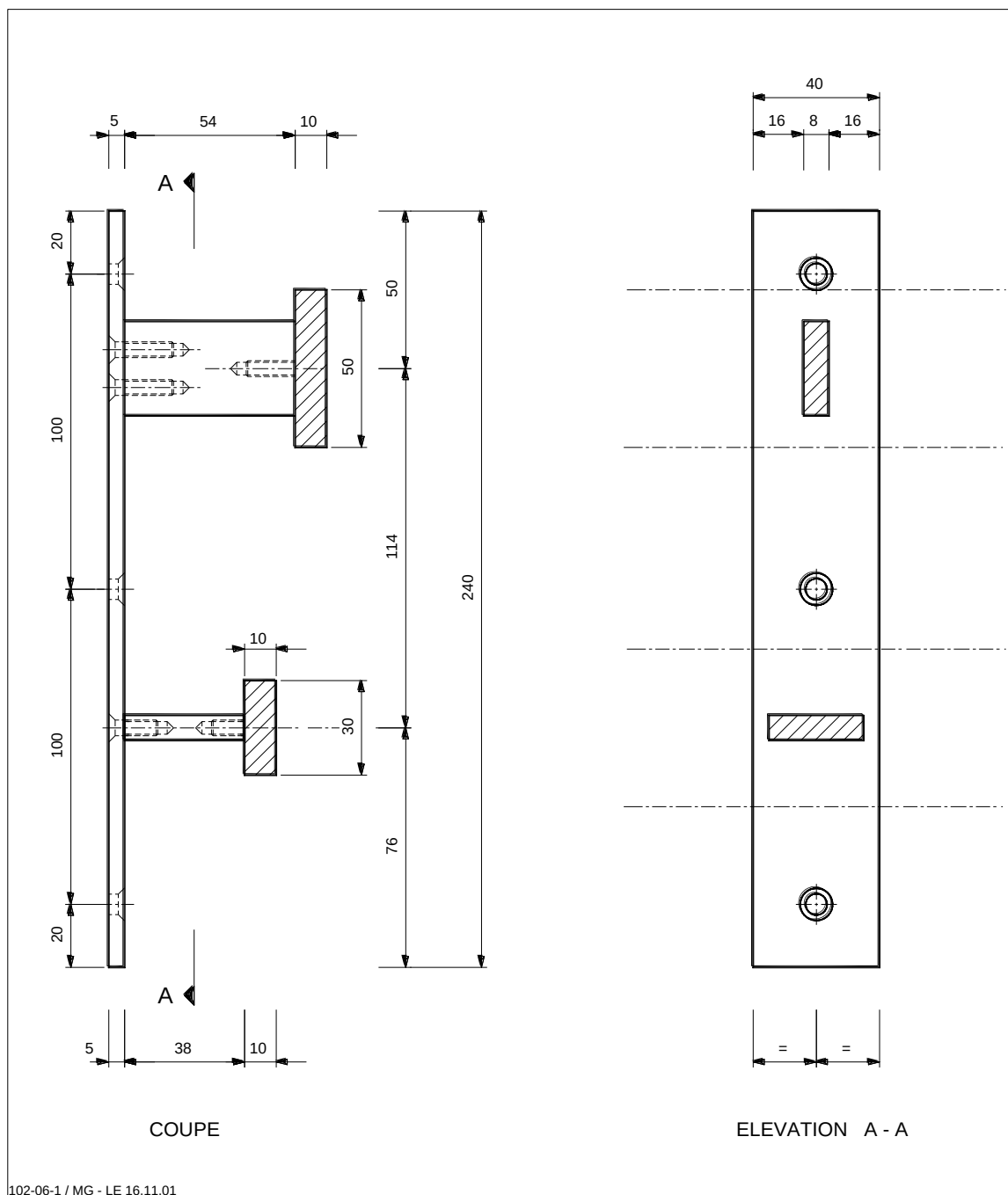


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS

1.4.1.2. RAIL PORTE-MONITORING LOURD (ISOMÉTRIE)

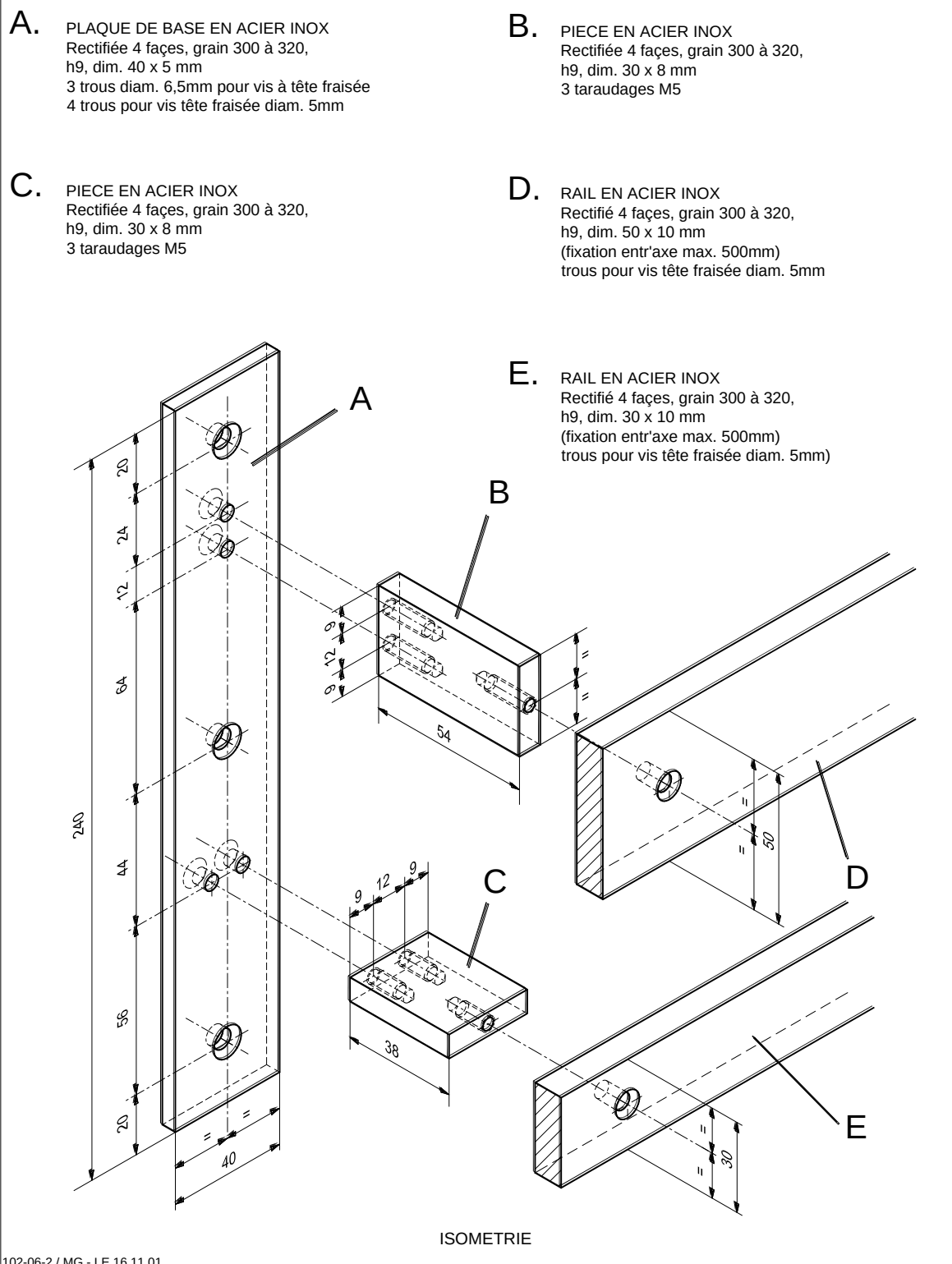


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS


1.4.2.1. PLATEAU PORTE-MONITORING

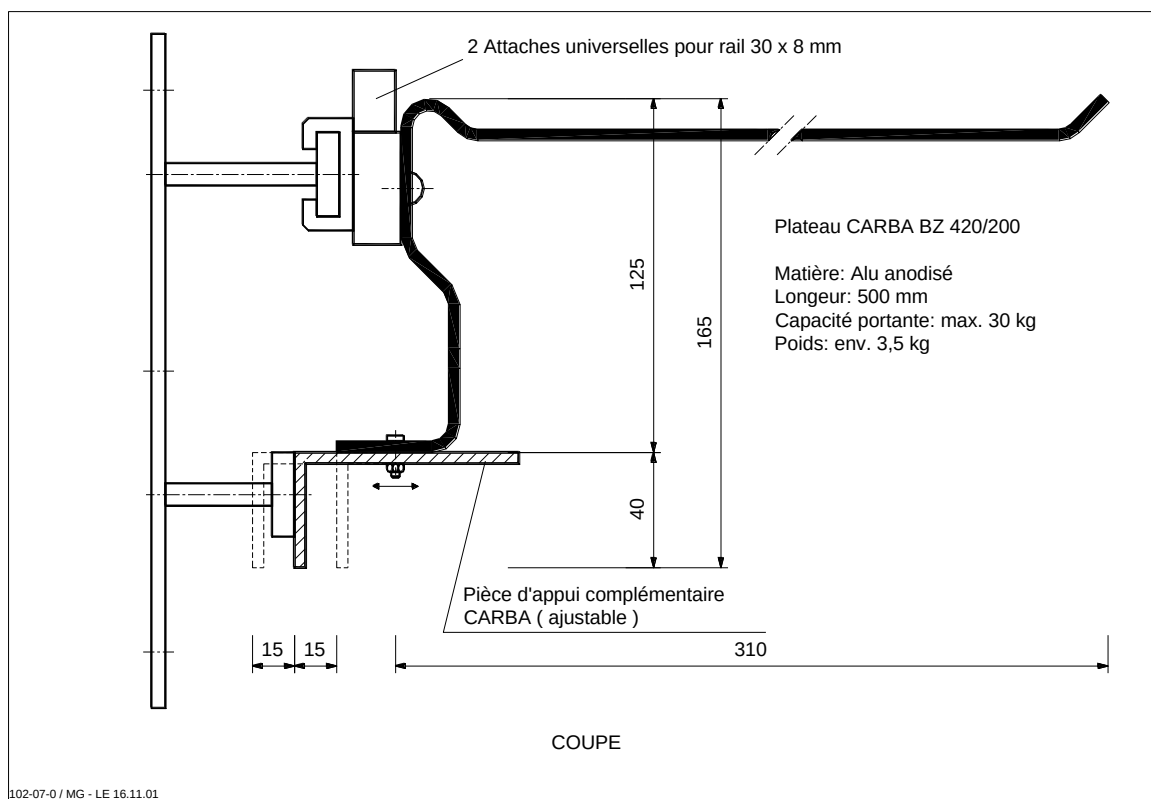

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS**1. ACCESSOIRES MURAUX****1.4. DÉTAILS****1.4.2.2. SUPPORT MONITORING ORIENTABLE CHUV**

A ADAPTER POUR RAIL CARBA EPAISSEUR 10 mm

* Voir modèle monitoring

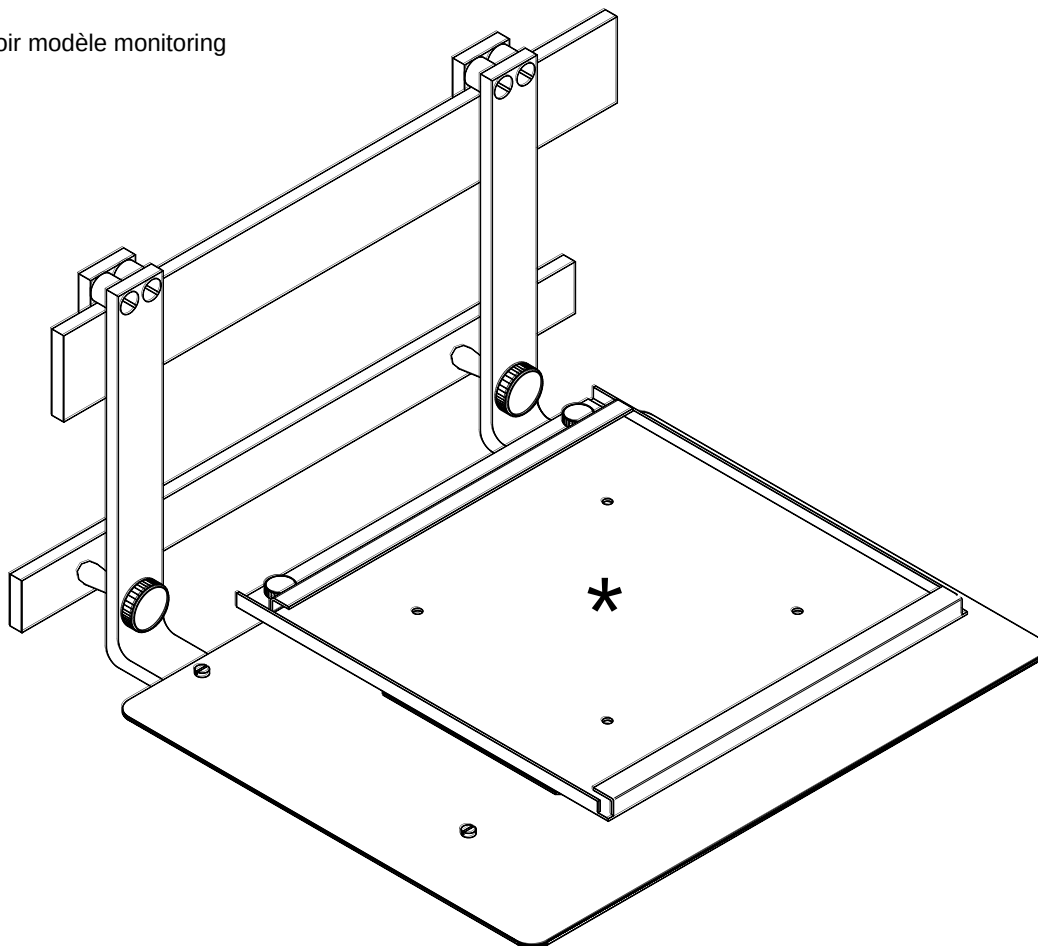


102-08-0 / MG - LE 05.02.02

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS


1.4.2.2. SUPPORT MONITORING ORIENTABLE CHUV

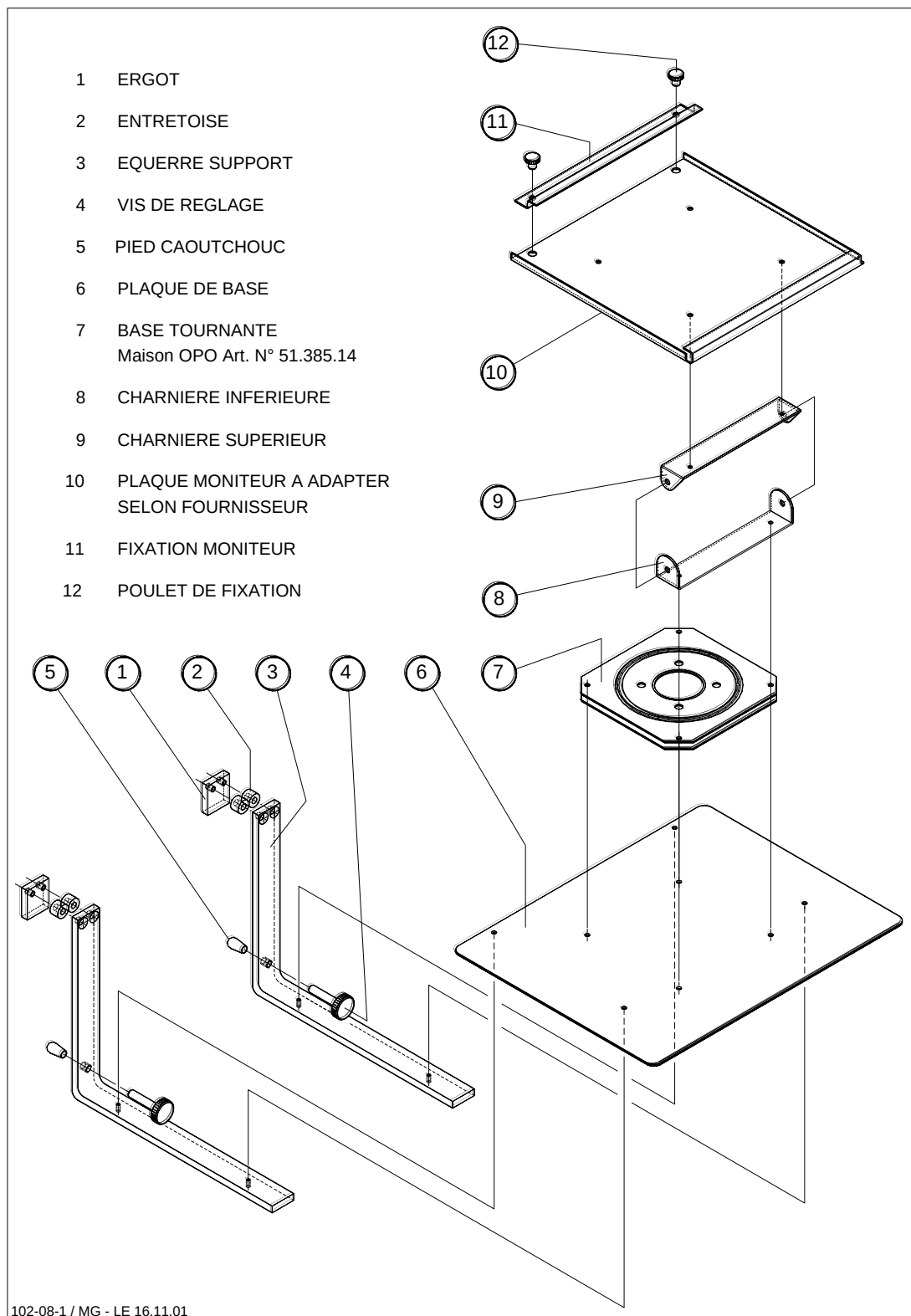

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX
- 1.4. DÉTAILS

1.4.2.2. SUPPORT MONITORING ORIENTABLE (CHUV)

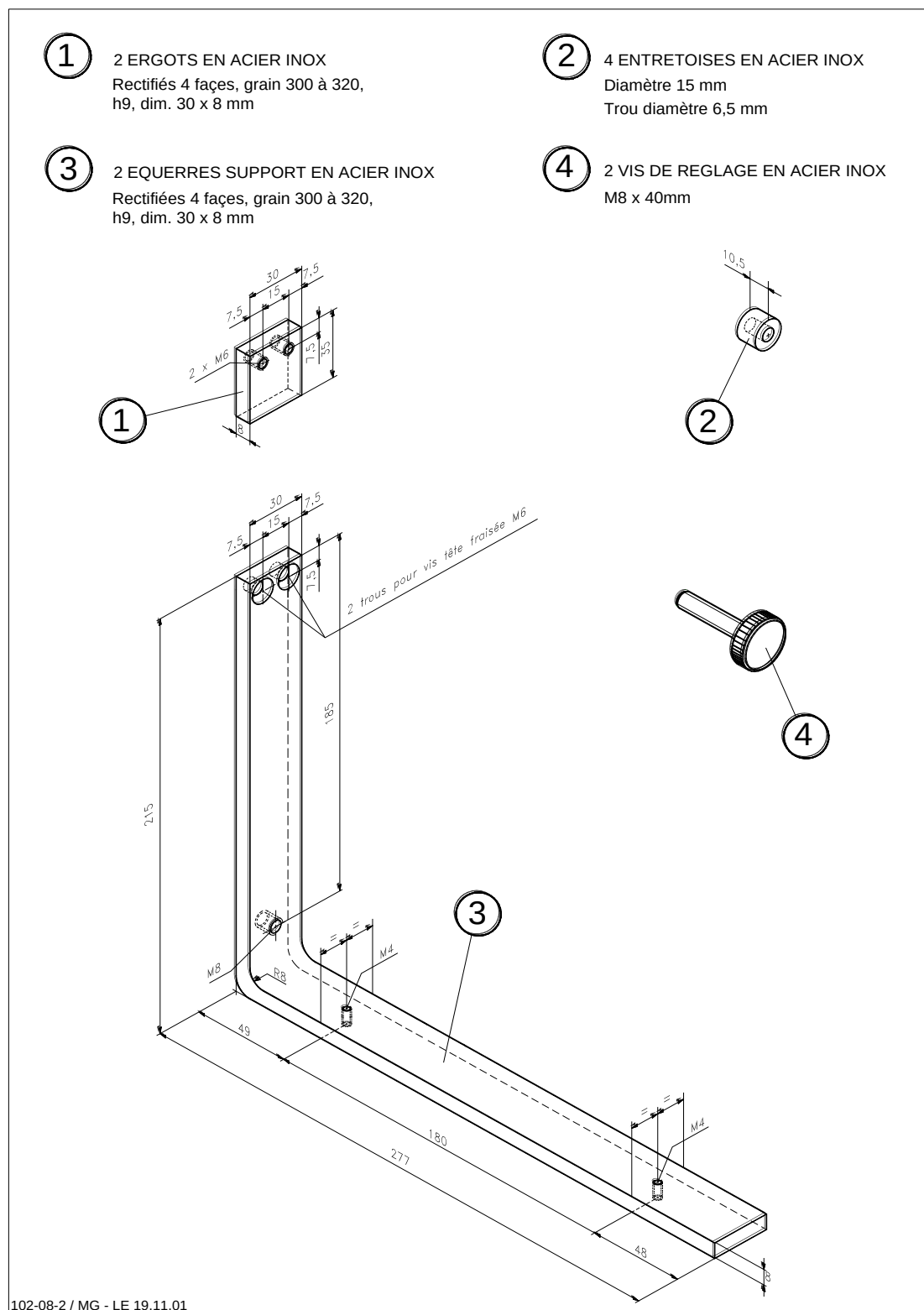


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS

1.4.2.2. SUPPORT MONITORING ORIENTABLE (CHUV)

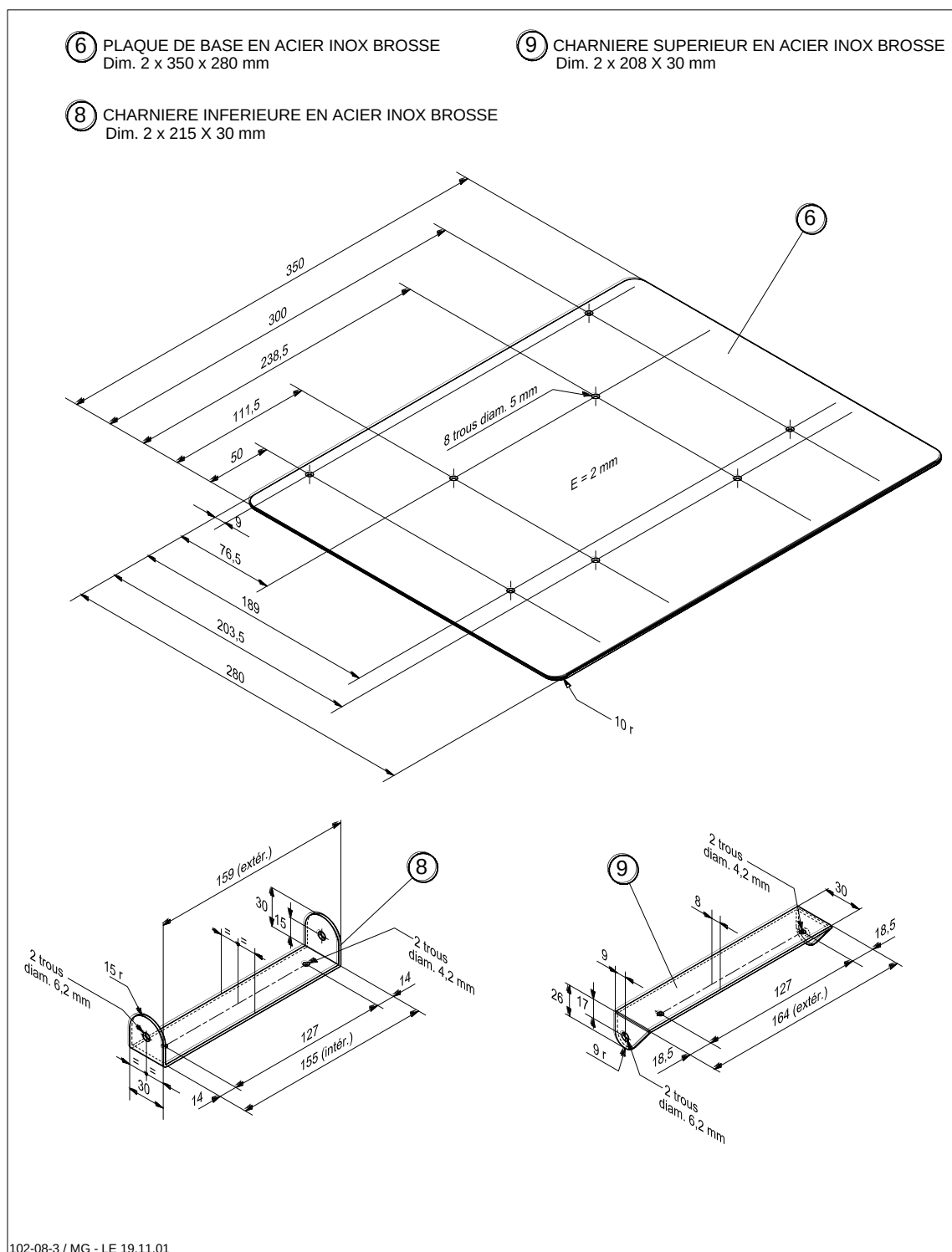


EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS

1.4.2.2. SUPPORT MONITORING ORIENTABLE (CHUV)

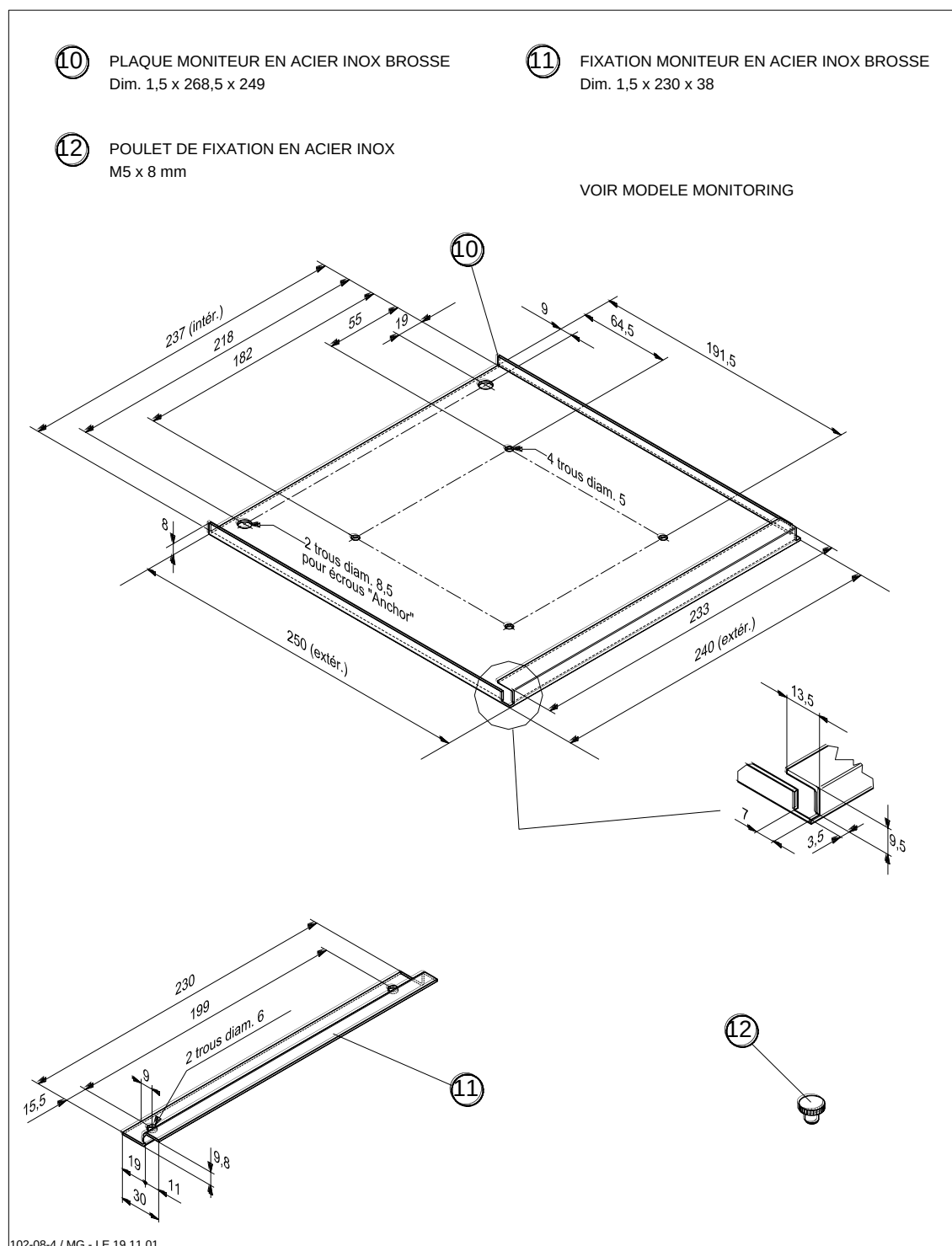

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS


1.4.3. RAIL DE SUPPORT ACCESSOIRES

A. PIÈCE EN ACIER INOX PLIÉE


Rectifiée 4 faces, grain 300 à 320,
h9, dim. 30 X 8 mm
2 trous diam. 6,5 mm pour vis à tête fraisée
1 taraudage M5 x 20 mm

B. RAIL EN ACIER INOX


Rectifié 4 faces, grain 300 à 320,
h9, dim. 30 x 8 mm
(fixation entr'axe max. 1000 mm)
trous pour vis tête fraisée diam. 5 mm

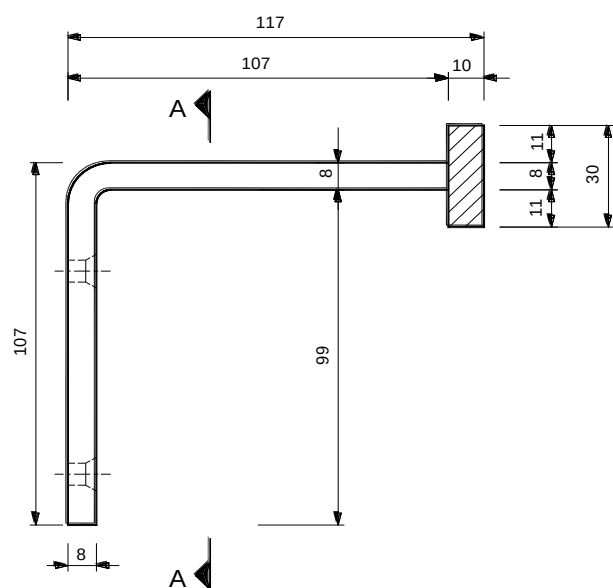

COUPE

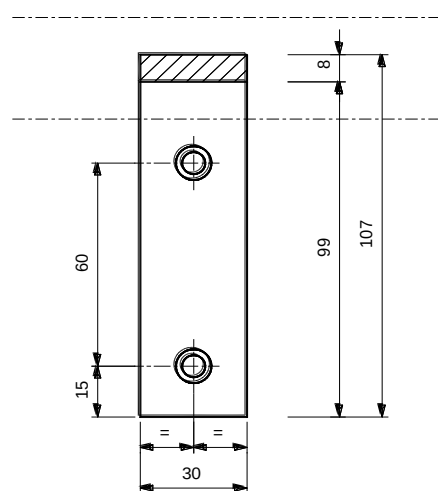

ELEVATION A - A

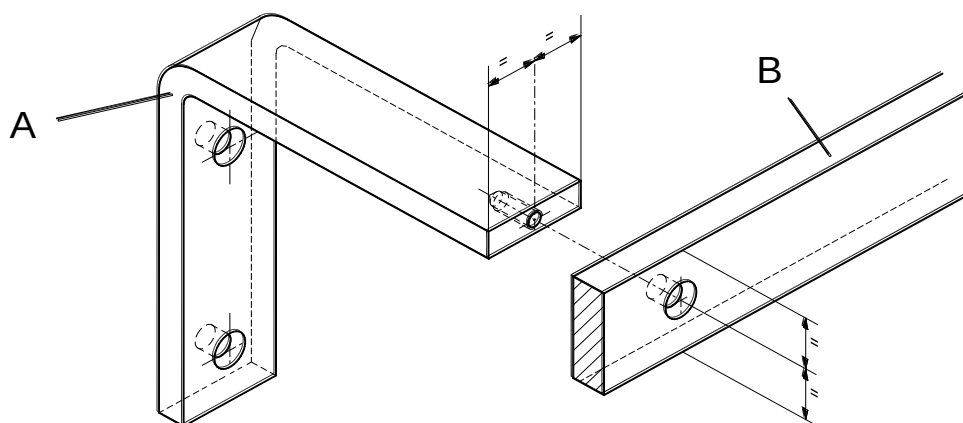

ISOMETRIE

102-09-0 / MG - LE 19.11.01

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS


1. ACCESSOIRES MURAUX
 1.4. DÉTAILS

VALABLE DES NOVEMBRE 2001

1.4.4.1. BUTOIR DE LIT

- A.** TUBE 1,5 mm EN ACIER INOX
 EN 2 PARTIES dim. 40 x 20 mm
 2 trous diam. 6,5
 1 trou diam. 11 mm (avec bouchon)
- B.** PIECE INOX dim. 37 x 17 x 3 mm
 1 taraudage M5

- C.** TUBE 2 mm EN ACIER INOX dim. 50 x 25 mm
 (fixation entr'axe max. 1000 mm)
 trous pour vis tête fraisée diam. 5 mm

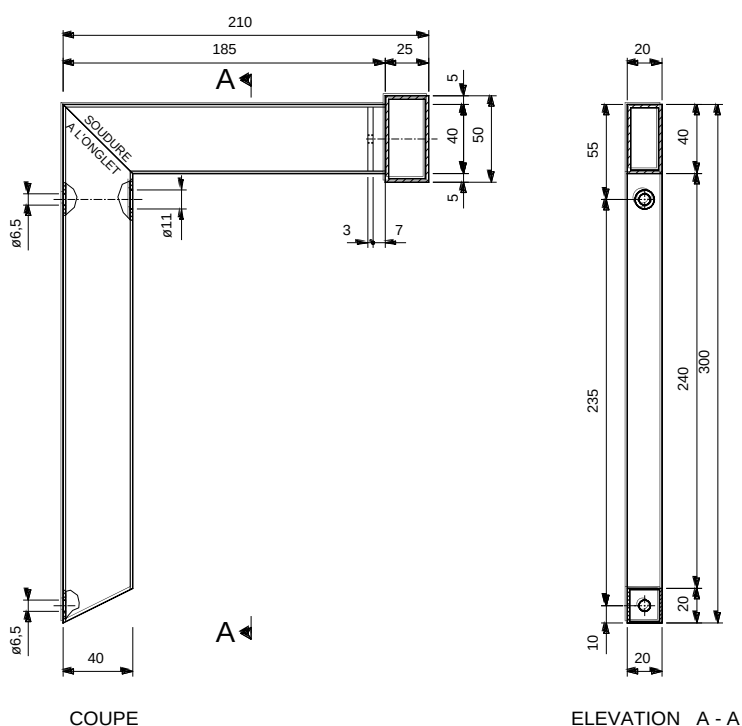

102-10-0 / MG - LE 19.11.01

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

1. ACCESSOIRES MURAUX

1.4. DÉTAILS


VALABLE JUSQU'À OCTOBRE 2001

1.4.4.2. BUTOIR DE LIT JUSQU'À OCTOBRE 2001

A. TUBE 1,5 mm EN ACIER INOX
EN 2 PARTIES dim. 40 x 20 mm
2 trous diam. 6,5
1 trou diam. 11 mm (avec bouchon)

B. PIECE INOX dim. 37 x 17 x 3 mm
1 taraudage M5

C. TUBE 2 mm EN ACIER INOX dim. 50 x 25 mm
(fixation entr'axe max. 1000 mm)
trous pour vis tête fraisée diam. 5 mm

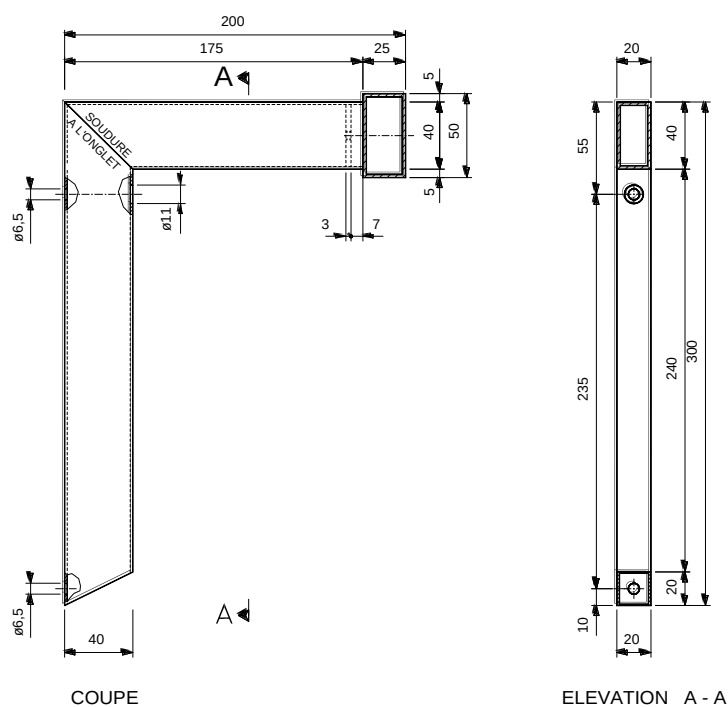

102-10-1 / MG - LE 19.11.01

2. *EQUIPEMENT DES GAINES TECHNIQUES A USAGE MEDICAL*

2.1. Nombre standard d'élément par lit dans les divers locaux... 26

EQUIPEMENT TECHNIQUE MURAL POUR LITS

2. EQUIPEMENT DES GAINES TECHNIQUES A USAGE MEDICAL
 2.1. NOMBRE STANDARD D'ÉLÉMENT PAR LIT DANS LES DIVERS LOCAUX

		CATEGORIE	2	3	4	4	2	3	4			
		LOCAL	CHAMBRE D'HOSPITALISATION ET SALLE D'EXAMEN	SALLE DE SOINS CONTINUS	SALLE DE SOINS INTENSIFS	SALLE DE REVEIL	BOX DES URGENCES	PRENATAL HOSPITALISATION	PRENATAL SOINS INTENSIFS ET CONTINUS			
		SUPPORT	GAINÉ LUMINEUSE GAINÉ TECHNIQUE	GAINÉ LUMINEUSE GAINES TECHNIQUES	GAINÉ LUMINEUSE GAINES TECHNIQUES	GAINÉ LUMINEUSE GAINES TECHNIQUES	GAINÉ LUMINEUSE GAINES TECHNIQUES	GAINÉ LUMINEUSE GAINES TECHNIQUES	GAINÉ LUMINEUSE GAINES TECHNIQUES			
* A L'ENTREE DU BOX SD = SUR DEMANDE												
COURANT FORT	INTERRUPTEUR ECLAIRAGE INDIRECT							1	1			
	ECLAIRAGE INDIRECT	1	1			1	1	1	1			
	INTERRUPTEUR ECLAIRAGE LECTURE/SOINS	1	1				1					
	ECLAIRAGE LECTURE/SOINS	1	1				1					
	INTERRUPTEUR ECLAIRAGE S/LIT			1		1	1	1	1			
	1 x 230V SECOURUE						2					
	1 x 230V S/FI SECOURUE POUR RX				1*			1	1			
	1 x 230V ASC RESPIRATEUR (AXE INCUB.)							1	1			
	1 x 230V ASC											
	3 x 230V MONITORING (ASC OU SECOURS)		1		1	1	1	1	1			
	3 x 230V SECOURUES	2	3	10	2	5	1	2	1	4		
	3 x 230V ASC							1	1	1	3	
	PRISE DE TERRE SIMPLE		9	30	6		12	12	10	21		
	RESERVE COURANT FORT	1	1		1							
COURANT FAIBLE	ALARME COEUR		1		1	1	1	1	1			
	APPEL MALADE	1	1		1	1	1					
	RJ45 TELEPHONE DOUBLE	1	SD		1							
	PRISE TELERESEAU	1	SD		1							
	RJ45 DOUBLE MONITORING	SD	1		1	1		1	1			
	RJ45 DOUBLE SICASI				1							
	RJ45 DOUBLE RESERVE	SD	SD		SD							
	RESERVE COURANT FAIBLE	1	1		1			2	2			
GAZ	O2		1	3	4	3	4	4	4			
	AC		1	1-2	4	2	2	4	4			
	V		1	3	5	3	4	4	4			
	NO											
	ASPIRATION GAZ NARCOTIQUE (y compris évacuation mélange NO-N2)			SD	1				1			

102-16-1 / MG Le 11.06.03