
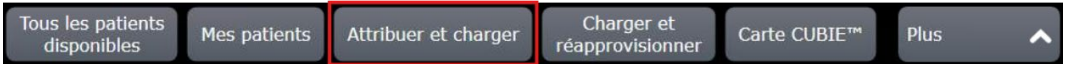
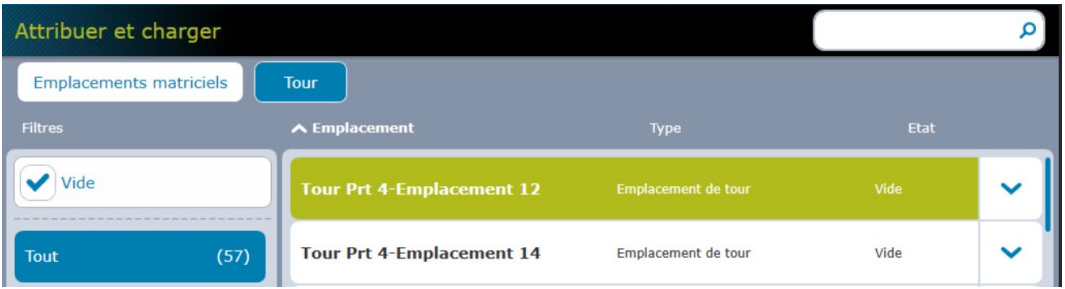
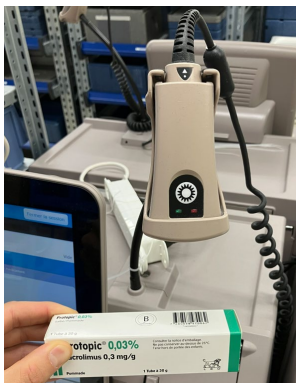
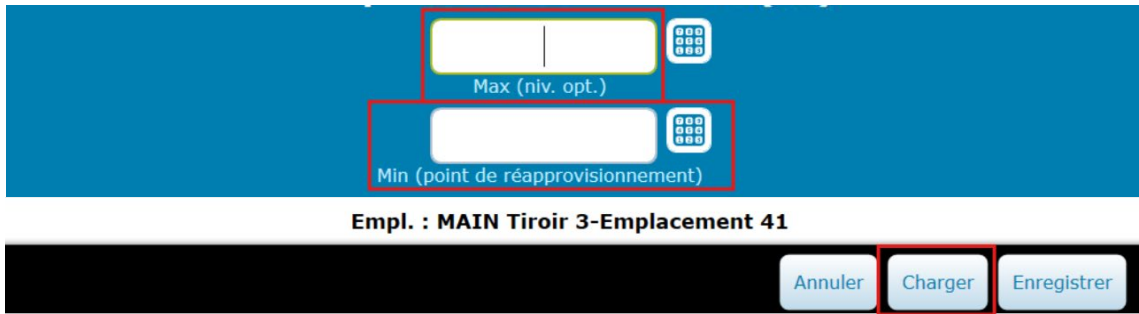


Référencer un nouveau médicament dans une APS BD Pyxis™

1.	Sur l'écran d'accueil, sélectionner « Attribuer et charger » :	
2.	Sélectionner un emplacement de stockage compatible avec le volume et la quantité de médicament à référencer. L'emplacement sélectionné devient vert :	
3.	Appuyer sur « Accepter » :	
4.	Scanner le code-barre de l'emballage du médicament à l'aide du lecteur de code-barre : - Dans le cas où celui-ci n'est pas reconnu : - Contactez votre APUS et/ou pha.aps@chuv.ch et refmed@chuv.ch, - Entrer manuellement le nom du médicament dans la barre de recherche et sélectionner-le dans la liste qui s'affiche : - Puis appuyer sur « Accepter »	
5.	- Cocher la case « stock standard » dans le cas où le médicament doit être recommandé automatiquement par l'APS BD Pyxis™, - Cocher la case « Unités fractionnelles » dans le cas où le médicament doit être prélevé millilitres par millilitres : - Ne pas cocher la case s'il faut prélever le médicament par flacons entiers.	
6.	Définir : - La quantité « Min » qui correspond au point de commande, - La quantité « Max » qui définit le maximum de réapprovisionnement. - Ces 2 quantités sont exprimées en « cpr. », « flac. », « fio. », « ser. », et non en « emballages de 30 cpr. » ou « boîte de 10 ser. ».	

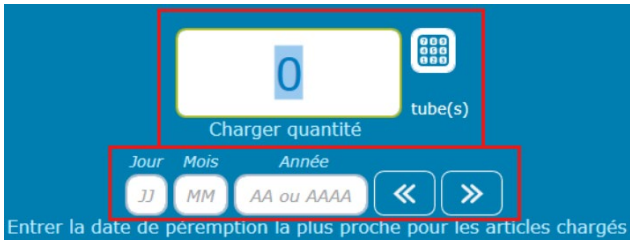

Rechercher manuellement le médicament à référencer expose les utilisateurs à des risques critiques d'erreurs d'administration.

7.	Sélectionner « Charger » pour débiter le chargement du médicament :	
8.	L'emplacement désigné s'ouvre.	
9.	Charger le médicament en indiquant : - La quantité d'unités chargée, - La date d'expiration.	
10.	Appuyer sur « Accepter » :	
11.	Fermer l'emplacement pour terminer l'opération.	