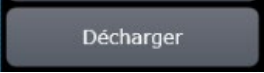
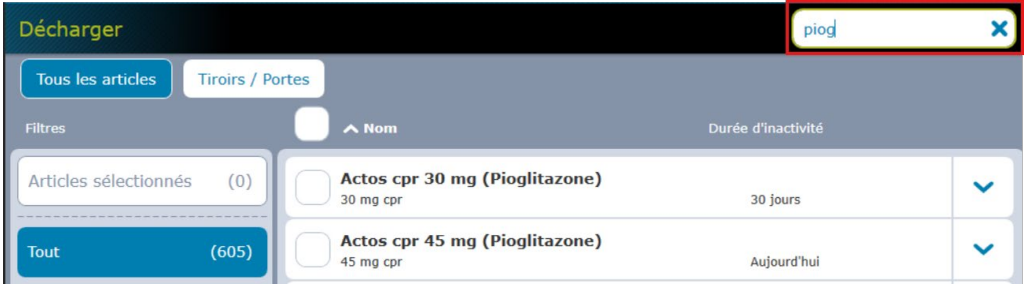
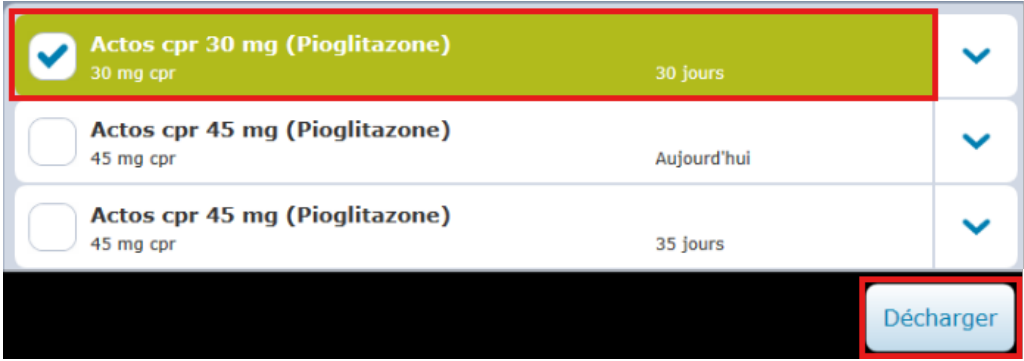
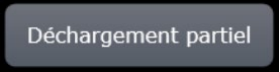


Décharger un médicament

Éliminer totalement un médicament de l'APS BD Pyxis™

1.	Sélectionner « Décharger » sur l'écran d'accueil ou dans le menu « Plus ».	
2.	Taper au minimum les 4 premières lettres du nom du médicament ou de la molécule désirée dans la barre de recherche :	
3.	Sélectionner le médicament à décharger dans la liste, celui-ci devient vert. Appuyer ensuite sur « Décharger » :	
4.	L'emplacement contenant le médicament s'ouvre.	
5.	Vider la totalité du médicament et refermer l'emplacement.	

Vider partiellement un emplacement (pour dépanner une autre unité ou diminuer la quantité en stock)

1.	Sélectionner « Déchargement partiel » sur l'écran d'accueil ou dans le menu « Plus ».	
2.	Répéter les étapes 2-3 ci-dessus et appuyer sur « Déchargement partiel ».	
3.	L'emplacement s'ouvre.	
4.	Vérifier la quantité présente dans l'emplacement et appuyer sur « Accepter ».	
5.	Indiquer la quantité à retirer, retirer la quantité indiquée, vérifier la date de péremption des unités de médicament restantes et refermer l'emplacement.	