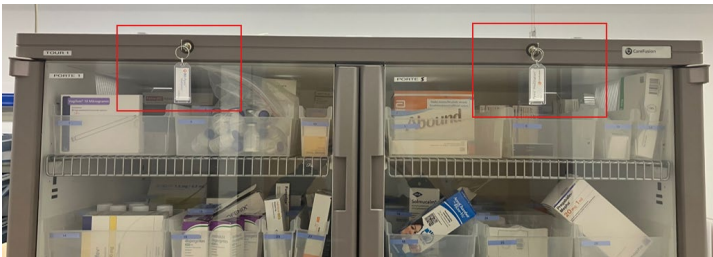


Mode dégradé - Ouverture de l'armoire vitrée

1.	Contactez le service de piquet pharmacie au 44 315 pour être accompagné.e dans cette procédure.
2.	Se munir des clés d'ouverture « <i>Left</i> » et « <i>Right</i> » disponibles auprès de l'ICS/ICUS : 
3.	Insérer la clé « <i>Left</i> » dans la serrure de gauche et la clé « <i>Right</i> » dans la serrure de droite : 
4.	Tourner chaque clé dans le sens des aiguilles d'une montre afin de déverrouiller les serrures : 
5.	Soulever le clapet qui surplombe la partie supérieure des portes vitrées de manière à mettre à nu le loquet de déverrouillage : 
6.	Pousser le loquet de déverrouillage vers le haut pour ouvrir toutes les portes vitrées : 
7.	Contactez votre APUS ou l'unité de logistique pharmaceutique via pha.aps@chuv.ch pour rétablir le comptage de l'inventaire lors du retour au mode normal.