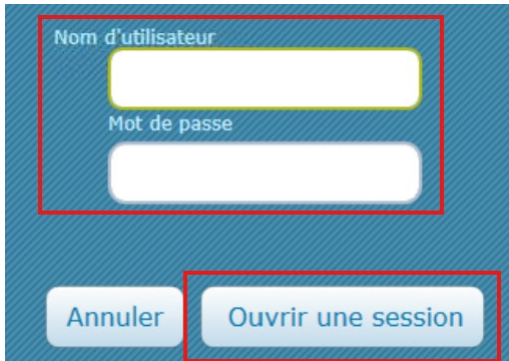


Enregistrement des empreintes digitales

Première utilisation

1.	Lors de la première utilisation des armoires à pharmacie sécurisées BD Pyxis™ : • Entrer son login et son mot de passe institutionnel et, • Appuyer sur « Ouvrir une session »: 
2.	Scanner successivement l'empreinte digitale de l'index de la main droite 3 fois : • Il est nécessaire de relever et de reposer l'index entre chaque scan.

Enregistrement d'une nouvelle empreinte digitale

1.	Sélectionner le menu « Plus » de la barre inférieure : 
2.	Sélectionner l'onglet « Préférence de l'utilisateur » puis « Changer ID Bio »: 
3.	Indiquer votre mot de passe institutionnel.
4.	Recommencer les étapes successives de scan avec un nouveau doigt.