

Mode dégradé – Ouverture de la serrure Pyxis™ reliée au réfrigérateur

1.	Contactez le service de piquet pharmacie au 44 315 pour être accompagné.e dans cette procédure.
2.	Se munir de la clé d'ouverture « <i>Left</i> » disponibles auprès de l'ICS/ICUS : 
3.	Insérer la clé « <i>Left</i> » dans la serrure : 
4.	Tourner la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de déverrouiller la serrure : 
5.	La serrure est maintenant déverrouillée et il est possible d'ouvrir le réfrigérateur sans passer par la Pyxis™.
6.	Contactez votre APUS ou l'unité de logistique pharmaceutique via pha.aps@chuv.ch pour rétablir le comptage de l'inventaire lors du retour au mode normal.