
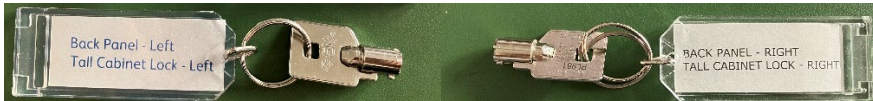
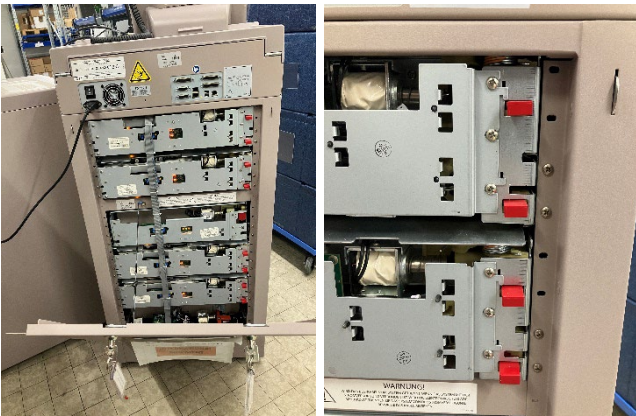


Mode dégradé – Ouverture des cubies

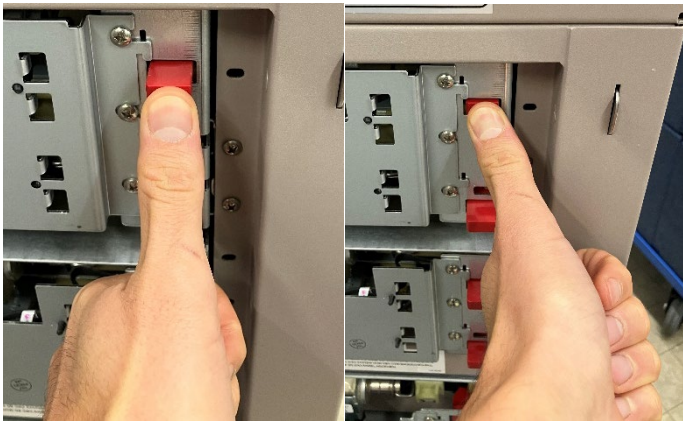

Cette action irréversible ne doit être utilisée qu'en dernier recours.

1.	Contacter le service de piquet pharmacie au 44 315 pour être accompagné.e dans cette procédure.
2.	Se munir des clés d'ouverture « <i>Left</i> » et « <i>Right</i> » disponibles auprès de l'ICS/ICUS : 
3.	Dégager le module Pyxis™ que vous souhaitez ouvrir afin d'avoir accès aux serrures à l'arrière et insérer la clé « <i>Left</i> » dans la serrure de gauche et la clé « <i>Right</i> » dans la serrure de droite : 
4.	Tourner les clés dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller les loquets : 
5.	Une fois les loquets déverrouillés, l'arrière des tiroirs dans lesquels disposés les cubies est apparent : 

6.	Presser le loquet de déverrouillage rouge du tiroir où se trouve le cubie à ouvrir :
	
7.	Le tiroir déverrouillé est maintenant accessible.
8.	Se munir d'un objet contondant afin de faire sauter la serrure Smart Cubie™ à l'aide d'un mouvement de levier :
	
9.	Contactez votre APUS ou l'unité de logistique pharmaceutique via pha.aps@chuv.ch pour remplacer le cubie et rétablir le comptage de l'inventaire lors du retour au mode normal.



Cette action est irréversible et rend le cubie inutilisable.



Il est obligatoire de contacter votre APUS ou pha.aps@chuv.ch une fois la situation normale rétablie.