
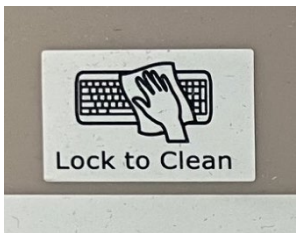
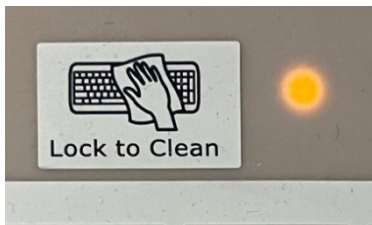


Procédure de reconnaissance du clavier lorsqu'il ne répond plus

1.	Vérifier que la touche « <i>Lock to Clean</i> » soit désactivée :
	Touche désactivée : clavier utilisable  Touche activée : clavier inutilisable 
2.	Si la touche est activée : - Désactivez la touche, - Le clavier est maintenant utilisable. Si la touche est désactivée : - Redémarrez la Pyxis™ en suivant les points 3 à 10.
3.	Dégager la Pyxis™ de son emplacement afin d'avoir accès au bouton d'alimentation marche/arrêt (I/O) situé à l'arrière :  
4.	Éteindre la Pyxis™ à l'aide de l'interrupteur O/I.
6.	Attendre que la Pyxis™ s'éteigne (l'écran est maintenant noir).
6.	Déconnecter le câble d'alimentation.
7.	Attendre 2 minutes.
8.	Reconnecter le câble d'alimentation.
9.	Rallumer la Pyxis™ à l'aide de l'interrupteur O/I.
10.	Laisser la Pyxis™ effectuer l'ensemble des mises à jour logicielles.

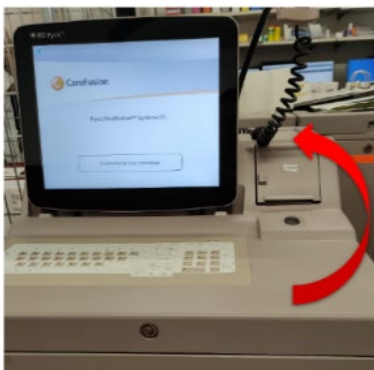

Dans le cas où cette manipulation ne fonctionne pas, contacter votre APUS et l'équipe pha.aps@chuv.ch.