


Procédure en cas : « d'écran bleu qui ne répond pas » ou « d'armoire figée/très lente »

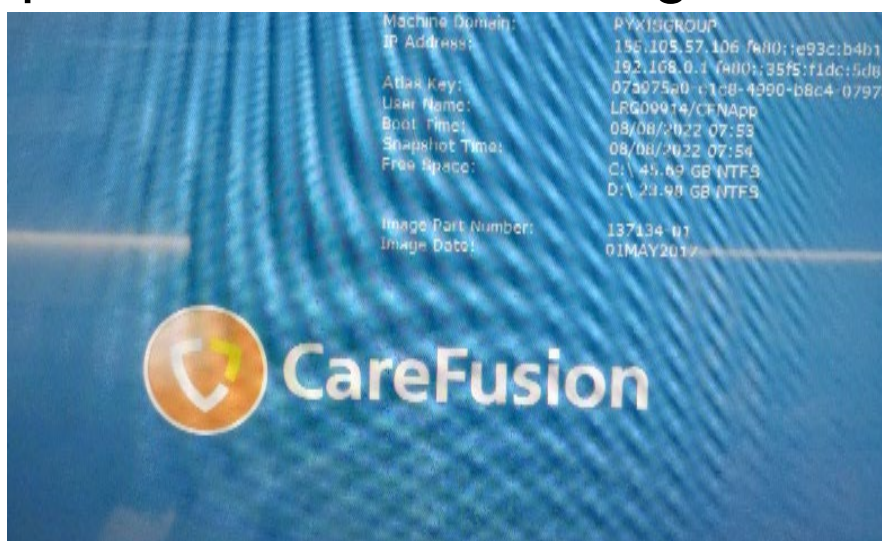

1.	Il arrive que la Pyxis™ se bloque pour une raison informatique.
2.	Dégager la Pyxis™ de son emplacement afin d'avoir accès au bouton d'alimentation marche/arrêt (I/O) situé à l'arrière : 
3.	Éteindre la Pyxis™ à l'aide de l'interrupteur O/I.
4.	Attendre que la Pyxis™ s'éteigne (l'écran est maintenant noir).
5.	Déconnecter le câble d'alimentation.
6.	Attendre 2 minutes.
7.	Reconnecter le câble d'alimentation.
8.	Rallumer la Pyxis™ à l'aide de l'interrupteur O/I.
9.	Laisser la Pyxis™ effectuer l'ensemble des mises à jour logicielles.



Dans le cas où cette manipulation ne fonctionne pas, contacter votre APUS et l'équipe pha.aps@chuv.ch.