

Procédure en cas de statut hors connexion



1.	Dégager la Pyxis™ de son emplacement afin d'avoir accès au bouton d'alimentation marche/arrêt (I/O) situé à l'arrière :
2.	Appuyer sur « Maintenance » situé dans le menu « Plus » de la barre inférieure de l'écran.
3.	Appuyer sur l'icône « Redémarrer MedStation » :
4.	Confirmer la maintenance en appuyant sur « oui » :
5.	Lors que l'écran devient noir : Éteindre la Pyxis™ à l'aide de l'interrupteur O/I.
6.	Déconnecter le câble d'alimentation.
7.	Attendre 10 minutes.
8.	Reconnecter le câble d'alimentation.
9.	Rallumer la Pyxis™ à l'aide de l'interrupteur O/I.
10.	Laisser la Pyxis™ effectuer l'ensemble des mises à jour logicielles.



Dans le cas où cette manipulation ne fonctionne pas, contacter votre APUS et l'équipe pha.aps@chuv.ch.