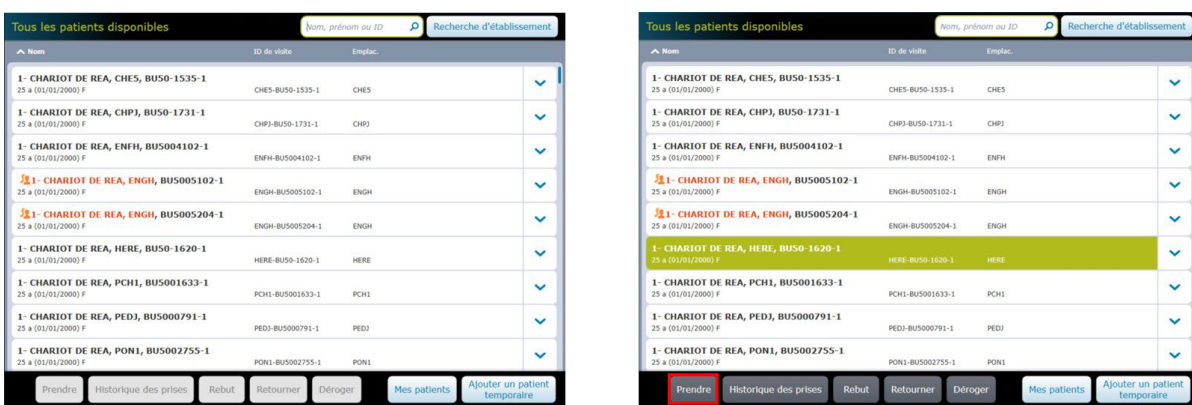
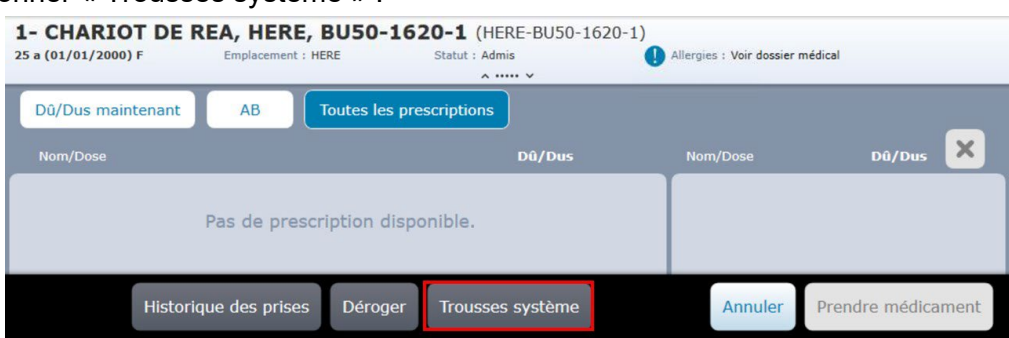
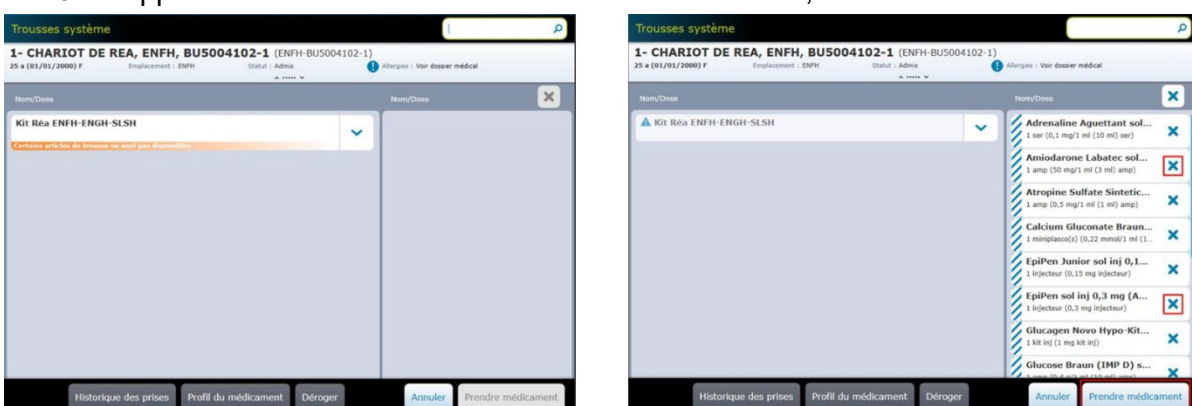


Procédure de retrait de kit

1.	Sélectionner « Tous les patients disponibles » dans la barre inférieure de l'écran : 
2.	Sélectionner un profil « 3- CHARIOT DE REA » : • Celui-ci devient vert.
3.	Sélectionner « Prendre » dans la barre inférieure de l'écran : 
4.	Sélectionner « Trousses système » : 
5.	Sélectionner le « KIT » qui est attribué à votre APS : • Tous les articles du Kit passent dans la colonne de droite (= liste des articles à retirer) : ○ Supprimer des articles de la colonne à l'aide des croix, si nécessaire. 
6.	Sélectionner « Prendre médicament ».
7.	Retirer les médicaments.