
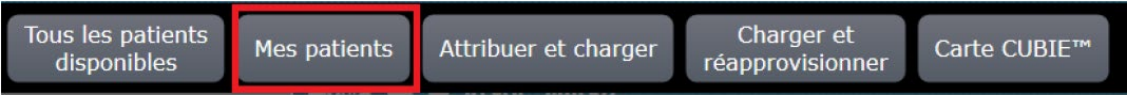


Création d'une liste « Mes patients »

1. Sélectionner « Mes patients » situé dans la barre inférieure de l'écran.

2. Sélectionner « Modifier la liste des patients » afin d'afficher la liste des patients de l'unité de soins et les ajouter/supprimer à votre liste « Mes patients » :
 - La liste « Mes patients » BD Pyxis™ n'est pas reliée à votre liste de patients attribués dans Soarian® :
3. Rechercher le/la patient.e dans la barre de recherche dans le coin supérieur droit :
 
 - Entrer les 3-4 premières lettres du nom de famille, ou
 - Scanner l'étiquette DITO, ou
 - Scanner le code barre Digistat, ou
 - Entrer le numéro de séjour UF.
4.
 - Sélectionner le/la patient.e désiré.e :
 - Celui/celle-ci passe dans la colonne de droite :
 - Si nécessaire, supprimer le/la patient.e de la sélection à l'aide de la croix à côté de son nom :
 - Appuyer sur « Accepter » pour valider votre liste.

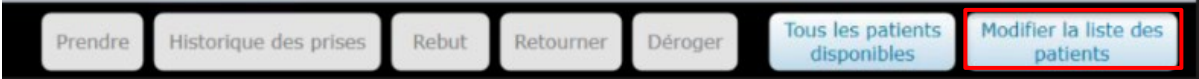

Lorsque le séjour Axys est fermé, le/la patient.e disparaît automatiquement de votre liste « Mes patients ».



Cette liste ne se réinitialise pas au bout de 24h comme dans Soarian :

- Il est nécessaire de la mettre à jour quotidiennement en ajoutant/supprimant les ancien.ne.s et nouveaux/nouvelles patient.e.s.